

WIPES PEROXY 4D

Desinfetante hospitalar para superfícies
fixas e artigos não críticos



Propriedades e Utilizações

WIPES PEROXY 4D são panos umedecidos com limpador desinfetante à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, desenvolvido especialmente para o uso em hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e odontológicas, podendo ser utilizado em superfícies fixas e artigos não críticos. WIPES PEROXY 4D limpa, desinfeta e alveja em uma única operação.

WIPES PEROXY 4D é ideal para limpeza e desinfecção de:

Superfícies fixas: Piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc.

Artigos não críticos: Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

Bactericida em 30 segundos:

Bactérias Multirresistentes

Acinetobacter baumannii

Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)

Staphylococcus MRSA

Bactérias Gram-Positivas

Enterococcus hirae

Staphylococcus aureus

Bactérias Gram-Negativas

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella choleraesuis

Fungicida em 5 minutos:

Candida albicans

Fungicida em 10 minutos:

Tricophyton mentagrophytes

Virucida em 60 segundos:

SARS-CoV-2

Bactericida em 60 segundos:

Bactérias Multirresistentes

Enterococcus faecium (VRE)

WIPES PEROXY 4D possui certificado de rótulo ecológico ABNT, comprovando que sua formulação e processo produtivo foram pensados de modo a minimizar desperdícios e impactos negativos no meio ambiente.



Informações Técnicas

CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Aparência: Líquido transparente

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH: 2,50 – 4,50

COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, tensoativos não iônicos, peróxido de hidrogênio, cloreto de alquil (C12-C16) dimetil benzil amônio, cloreto de didecil dimetil amônio e alcalinizante.

Princípios ativos:

Cloreto de alquil (C12-C16) dimetil benzil amônio + cloreto de didecil dimetil amônio: 0,08%.

Peróxido de hidrogênio: 1,25%

EMBALAGEM

6 x 150 panos

PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N°

3.0018.0191

WIPES PEROXY 4D

Desinfetante hospitalar para superfícies
fixas e artigos não críticos



Instruções de Uso

WIPES PEROXY 4D é pronto para o uso. Coloque luvas.

1. Para primeira utilização, retire a tampa do pote e remova o lacre de segurança.
2. Puxe a ponta do pano, partindo do centro do rolo.
3. Posicione a ponta do pano no orifício central interno da tampa. Recoloque a tampa e puxe o pano. Os próximos aparecerão automaticamente.
4. Puxe o pano umedecido da embalagem, em um ângulo de 45°, e aplique sobre a superfície, espalhando a solução uniformemente por toda a área.
5. Enxaguar e secar, se necessário.

Para ação bactericida:

6. A superfície tratada deve permanecer visivelmente molhada por, no mínimo, 30 segundos para a desinfecção. Enxaguar e secar, se necessário.
7. Em caso de superfícies com elevado grau de sujidade, recomendamos que lave previamente a superfície ou o artigo, enxágue e seque, ou repita a operação descrita acima, trocando o pano umedecido.

Para ação fungicida:

8. A superfície tratada deve permanecer visivelmente molhada por, 5 minutos (*Candida albicans*) ou 10 minutos (*Tricophyton mentagrophytes*) para a desinfecção. Enxaguar e secar, se necessário.
9. Em caso de superfícies com elevado grau de sujidade, recomendamos que lave previamente a superfície ou o artigo, enxágue e seque, ou repita a operação descrita acima, trocando o pano umedecido.

Para SARS-CoV-2 e VRE:

10. A superfície tratada deve permanecer visivelmente molhada por, no mínimo, 60 segundos para a desinfecção. Enxaguar e secar, se necessário.
11. Em caso de superfícies com elevado grau de sujidade, recomendamos que lave previamente a superfície ou o artigo, enxágue e seque, ou repita a operação descrita acima, trocando o pano umedecido.

ATENÇÃO:

- Não usar para higiene pessoal.
- Não é lenço de bebê.
- Não jogar no vaso sanitário.
- O pano não é reutilizável ou lavável. Descarte-o após sua utilização.
- Mantenha a tampa fechada após o uso para manter as propriedades do produto.

Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.



HIGIENE HOSPITALAR