

# DIFFENSE



## Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos

### Propriedades e Utilizações

DIFFENSE é um desinfetante clorado com ação de limpeza e alvejamento, indicado para superfícies fixas encontradas em áreas críticas, semicríticas e não críticas, bem como para artigos não críticos, não sensíveis a produtos clorados, em ambientes hospitalares e de assistência à saúde, como clínicas, laboratórios e consultórios.

Possui amplo espectro de ação microbiológica, com eficácia comprovada frente a *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa* e esporos de *Clostridioides (Clostridium) difficile*.

Além da desinfecção, apresenta alto poder de limpeza para remoção de sujidades impregnadas em cerâmicas, azulejos, pastilhas, louças sanitárias, plásticos, rejuntes, box e superfícies em geral de banheiros, vestiários e demais ambientes.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Aparência:** Líquido transparente à turvo

**Cor:** Incolor à amarelado

**Odor:** Característico

**pH:** 12,0 – 14,0

#### COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrantes, alcalinizantes, dispersante, óxido de cômico alquil dimetil amina (0,30%) e hipoclorito de sódio.

#### TEOR DE ATIVOS BACTERICIDAS

Teor de cloro ativo no início da validade do produto: 3,00% p/p.

Teor de cloro ativo mínimo ao final da validade do produto: 1,94% p/p.

#### EMBALAGEM

2x5 L

#### Nº REGISTRO MS:

3.0018.0214

### Instruções de Uso

#### Limpeza e Desinfecção em uma única operação de superfícies fixas e artigos não críticos:

1. Diluir o produto em água na proporção de até 1:100 (10 ml para cada 1 litro de água), conforme o grau de sujidade da superfície ou artigo.
2. Aplicar a solução sobre as superfícies fixas ou artigos não críticos, garantindo cobertura completa.
3. Deixar agir por 10 minutos.
4. Esfregar com o auxílio de escovas ou fibras de limpeza adequadas.
5. Em seguida, enxaguar com água limpa e secar.
6. Avaliar o nível de sujidade e se necessário, repetir o procedimento para garantir a eficácia da limpeza e desinfecção.

#### Eliminação de *Clostridioides (Clostridium) difficile*:

1. Lavar, enxaguar e secar as superfícies previamente.
2. Diluir o DIFFENSE em água na proporção de até 1:30 (34 ml do produto para 1 L de água).
3. Aplicar a solução de produto nas superfícies e deixar agir por 10 minutos.
4. Enxaguar e secar.

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

