

# SPARCHLOR

## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos



### Propriedades e Utilizações

SPARCHLOR é um desinfetante hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 2,5% de cloro ativo (25.000 ppm), indicado para áreas críticas, tais como: centro cirúrgico, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, etc., para áreas semicríticas, tais como: enfermaria e apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc., e áreas não críticas, tais como: vestiários, áreas administrativas, etc., podendo ser utilizado em superfícies fixas, tais como: pisos, paredes, bancadas, tetos, louças sanitárias e macas, artigos não críticos, tais como: suporte de soro, comadres, papagaios, bacias, cuba rim e cadeiras de banho, bem como, área de lactários, para a desinfecção de mamadeiras, bico de mamadeiras, chupetas, entre outros utensílios.

SPARCHLOR tem ação bactericida comprovada contra os microrganismos: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella Choleraesuis* e *Escherichia coli*.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA

**Aparência:** Líquido Transparente

**Cor:** Esverdeada

**Odor:** Característico

**pH:** 11,5–13,5

**Teor de Cloro Ativo:** 2,25–2,75%

#### COMPOSIÇÃO

Água, hipoclorito de sódio, estabilizante e hidróxido de sódio.

#### EMBALAGEM

2 x 5 Lts

#### PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N°

3.0018.0147



# SPARCHLOR

## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos



### Instruções de Uso

#### Para desinfecção de superfícies fixas:

1. Antes do procedimento de desinfecção, devemos realizar a limpeza utilizando detergente e ação mecânica para remoção das sujidades das superfícies e/ou equipamentos impregnados com matéria orgânica (óleo, gordura, sangue ou pus). A limpeza correta representa uma etapa essencial para o controle microbiano, reduzindo a carga bacteriana.
2. Diluir SPARCHLOR, na diluição de até 1:40 (625 ppm) e aplicar sobre a superfície, deixando agir por 10 minutos.
3. Em seguida, enxágue e seque.

Método	Diluições
Desinfecção de Superfícies Fixas	1:40 (25 mL por litro de água)

#### Desinfecção de artigos não críticos:

1. Realizar lavagem prévia, utilizando detergente e efetuando ação mecânica. Enxaguar para remover todo residual do produto.
2. Em seguida, diluir SPARCHLOR, na diluição de até 1:40 (625 ppm).
3. Realizar a imersão dos artigos na solução por 10 minutos.
4. Em seguida, enxágue e seque.

Método	Diluições
Desinfecção de artigos não críticos	1:40 (25 mL por litro de água)

#### Desinfecção de mamadeiras, bicos e chupetas:

1. Realize rigorosa lavagem prévia com escova e detergente e enxágue abundantemente.
2. Em seguida, diluir SPARCHLOR, na diluição de até 1:40 (625 ppm).
3. Imergir os artigos na solução de produto por 10 minutos. Evite a formação de bolhas de ar no interior dos artigos.
4. Em seguida, enxágue e seque.

Método	Diluições
Desinfecção de mamadeiras, bicos e chupetas	1:40 (25 mL por litro de água)

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

